


separate
Beinschlaufen
zurückgelehnte
Position
schulterhoch



Der Hebegurt für Beinamputierte ist ein Modell mit separaten Beinschlaufen, das bis auf Schulterhöhe reicht. Er verfügt über einen verstärkten Rückenbereich und eignet sich für Patienten/Pflegebedürftige mit doppelseitiger oder einseitiger Beinamputation. Auch Patienten/Pflegebedürftige mit Hüftproblemen oder mit erhöhtem Risiko, aus dem Hebegurt zu rutschen, können optimal versorgt werden. Dieser Gurt ist in Polyester oder Polyesternetz erhältlich.

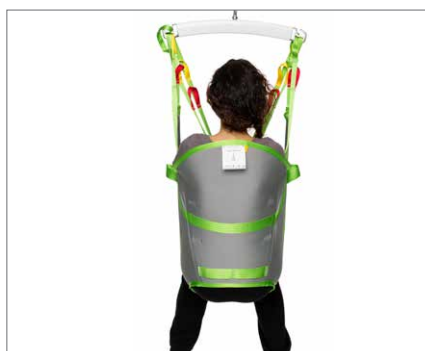

Vielseitig einsetzbar

Der Hebegurt für Beinamputierte aus Polyester ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung. Somit ist dieser Hebegurt für die meisten Hebesituationen ideal geeignet. Das Polyesternetz ermöglicht den Einsatz des Hebegurtes beim Baden oder Duschen. Der Nutzer dieses Hebegurtes muss seine Kopfbewegungen gut kontrollieren können. Die leicht zurückgelehnte Position verhindert, dass der Patient/Pflegebedürftige aus dem Hebegurt rutscht.

Taillengürtel ist in verschiedenen Größen mit Klett- oder Schnallenverschluss erhältlich. Das einzigartige Design bietet den zusätzlichen Vorteil, dass der Patient/Pflegebedürftige seine Arme, je nach seinen Möglichkeiten, im Hebegurt oder außerhalb des Hebegurtes positionieren kann.

Vereinfachte Pflege und Anpassung

Unsere Hebegurte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Sie verfügen über verstärkte Schlaufen und sind mit hochfestem Nylongewebe ummantelt, damit sie auch bei intensivster Nutzung robust und widerstandsfähig sind. Jedes Hebegurtelement trägt einen Farbcode, um eine schnelle und einfache Auswahl des richtigen Hebegurtes zu gewährleisten. Die Schlaufen sind ebenfalls mit einem Farbcode versehen, um die erforderliche Positionierung einfach festlegen zu können. Dieses Produkt bietet optimale Unterstützung im Pflegealltag.



Zusätzliche Unterstützung

Der Hebegurt für Beinamputierte verfügt über einen verstärkten Rückenbereich und bietet dadurch zusätzliche Unterstützung für Patienten/Pflegebedürftige mit geringer Rumpfstabilität. Außerdem sind die Beinschlaufen verstärkt. Der Hebegurt für Beinamputierte lässt sich mit oder ohne optionalen Taillengürtel verwenden. Der



Zubehör



Verlängerungsschlaufen
Zur Erweiterung des Gurtes, um die Hebeposition zu ändern oder Beinteile zusammenzuhalten. Verschiedene Längen erhältlich.
Art.-Nr.: 21180-*



Taillengürtel
Klett- oder Schnallen-verschluss. Erhältlich in Junior- und Erwachsenen-Größen. Klett Art.-Nr. 25145-**
Schnalle Art.-Nr. 25146-***



gepolsterte Abdeckung
Schützt den Patienten vor Verletzungen mit dem Hebebügel. Nicht zur Verwendung in feuchter Umgebung.
Art.-Nr.: 50866



Hebebügel für 2-, 3- oder 4-Punkt-Aufhängung
Artikel-Nr. 57551, 55764 (2- oder 3-Punkt-Schnellspanner), 55619 (4-Punkt-Anbringung Beinhaken)

Anwendung




Transfer in das / aus dem Bett
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Bett. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Transfer auf den / vom Stuhl
Geeignet für Transfers auf den Stuhl oder vom Stuhl sowie für Positionswechsel. Der Patient kann für kurze Zeit darin verweilen.




Verwendung vom Boden
Geeignet für Transfers vom Boden.

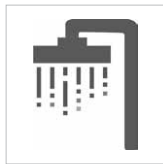


Einsatz beim Duschen
Nur Netzmaterial aus Polyester ist für feuchte Umgebungen geeignet.


Pflege und Eigenschaften

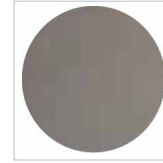

Polyester
Langlebig, geringe Reibung, lässt sich einfach reinigen und ermöglicht eine leichte Positionierung.

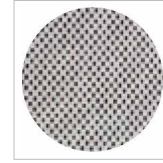

Polyesternetz
Weiches, dünnes Material, das atmungsaktiv ist und schnell trocknet. Ideal zum Baden oder Duschen.

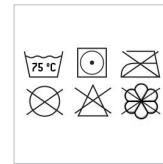


Pflegehinweise
Pflegehinweise auf dem Etikett beachten. Verwenden Sie beim Waschen einen geeigneten Wäschesack.



Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	A	B	C
Polyester	Polyesternetz				
25040-JM	25140-JM	Junior Medium	19 cm / 7,4"	61 cm / 24,1"	55 cm / 21,7"
25040-S	25140-S	Small	26 cm / 10,2"	72 cm / 28,3"	57 cm / 22,4"
25040-M	25140-M	Medium	36 cm / 14,2"	78 cm / 30,7"	59 cm / 23,2"
25040-L	25140-L	Large	46 cm / 18,1"	88 cm / 34,6"	62 cm / 24,4"
25040-XL	25140-XL	Extra Large	50 cm / 19,6"	101 cm / 39,8"	65 cm / 25,6"
maximales Nutzergewicht	250 kg / 551 lb				

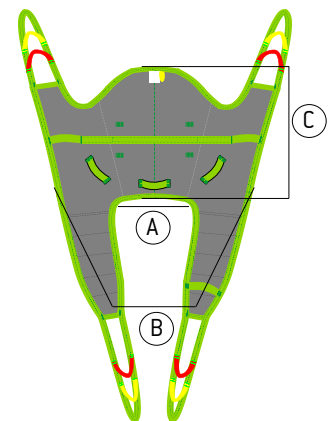

* In verschiedenen Längen erhältlich: 10 cm / 3,9" (21180-10), 15 cm / 5,9" (21180-15), 20 cm / 7,8" (21180-20), 25 cm / 9,8" (21180-25), 35 cm / 13,7" (21180-35)

** Junior-Größen: 40 cm / 15,7" (25145-40B), 50 cm / 19,7" (25145-50B), 60 cm / 23,6" (25145-60B); Erwachsenen-Größen: 60 cm / 23,6" (25145-60), 70 cm / 27,6" (25145-70), 80 cm / 31,5" (25145-80), 90 cm / 35,4" (25145-90), 110 cm / 43,3" (25145-110), 120 cm / 47,3" (25145-120)

*** Junior-Größen: 40 cm / 15,7" (25146-40B), 50 cm / 19,7" (25146-50B), 60 cm / 23,6" (25146-60B); Erwachsenen-Größen: 60 cm / 23,6" (25146-60), 70 cm / 27,6" (25146-70), 80 cm / 31,5" (25146-80), 90 cm / 35,4" (25146-90), 100 cm / 39,4" (25146-100), 110 cm / 43,3" (25146-110), 120 cm / 47,3" (25146-120)



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HO)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com