



sichere E-Clips

komfortable Passform

ergonomisch



Unterstützung beim Aufstehen

Unser Rückengurt bietet durch sein verstärktes Rückenteil eine optimale Unterstützung, auch für Patienten/Pflegebedürftige mit geringer Rumpfstabilität und Beinkontrolle. Die sichere Passform ermöglicht eine ergonomische Bewegung.



Der gepolsterte Rückenbereich gewährleistet während des Aufrichtvorgangs eine komfortable Unterstützung im Rücken des Patienten/Pflegebedürftigen. Dies fördert eine natürliche Bewegung. Außerdem sorgt der Rückengurt für ein sicheres Gefühl beim Transfervorgang. Dank des integrierten Fixiergurts mit Schnallenverschluss bleibt der Gurt während des gesamten Transfers an seiner Position. Das rutschfeste Material an der Innenseite des Rückenteils verhindert ein Hochrutschen des Gurtes beim Aufheben. Hierdurch können sich Patient/Pflegebedürftiger und Pflegekraft vollständig auf den Aufrichtvorgang konzentrieren. Der Rückengurt ist auch dann eine hilfreiche Ergänzung bei der Nutzung einer Aufstehhilfe, wenn die Rumpfstabilität der pflegebedürftigen Person eingeschränkt ist oder andere Bedingungen das (Auf-) Stehen erschweren.

Der universelle E-Clip ist eine bewährte Befestigung für den Hebegurt an einem Lifter, der die Gefahr von Anwenderfehlern deutlich verringert. Der Clip wird um die Sicherheitsaufnahme des Hehebügels gelegt und rastet mit einem deutlich hörbaren „Klick“ ein. Das Pflegepersonal weiß so, dass der Clip sicher eingerastet ist und ein versehentliches Lösen nunmehr ausgeschlossen ist.

Einfach anzupassen sind unsere Hebegurte auch dank des Farbcodes, der eine schnelle und einfache Unterscheidung der Größen ermöglicht. Die Hebegurte von Human Care werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Das Design zeichnet sich durch starkes, grünes Gurtband um den Hebegurt herum aus. Zusammen ergibt sich so ein belastbares und langlebiges Produkt.



Mobilitätshilfen



Pflegebetten



Hebelösungen



Hygiene



Pflegestühle

Anwendung



Zum und vom Bett
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Bett. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Zum und vom Stuhl
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Stuhl. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Stehtraining
Unterstützt bei Frühmobilisierung und Rehabilitationsübungen.



Toilettengang
Nur Polyester Netz Stoff kann zum Toilettengang verwendet werden.


Pflege und Eigenschaften



Polyester
Langlebig, reibungsarm, leicht zu reinigen und bequem zu positionieren.



E-Clip mit integrierter Sicherung
E-Clip-Verriegelung mit Einhandbedienung. Universell einsetzbar für alle Lifter mit Pilzbefestigung. Ø 6,8-8,2 mm

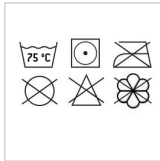


Pflegehinweise
Pflegehinweise auf dem Etikett beachten. Verwenden Sie beim Waschen einen geeigneten Wäschesack.



Technische Daten

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Größe	Farbe	A	B	C
Rückengurt S	25130C-S	Small		69 cm / 27.2"	27 cm / 10.6"	33cm / 13"
Rückengurt M	25130C-M	Medium		83 cm / 32.7"	30 cm / 11.8"	39 cm / 15.3"
Rückengurt L	25130C-L	Large		92 cm / 36.2"	34 cm / 13.4"	44 cm / 17.3"
Rückengurt XL	25130C-XL	Extra Large		103 cm / 40.5"	39 cm / 15.3"	50 cm / 19.7"
	maximales Benutzergewicht	250 kg / 551 lb				

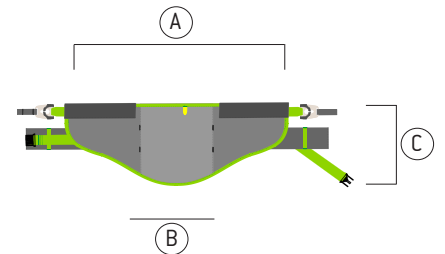

98006 Rev 02 DE Produktinformationen Back Belt E-Clip, Okt. 2020



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com