


COSMOS DECKENLIFTER

KURZANLEITUNG



Komponenten

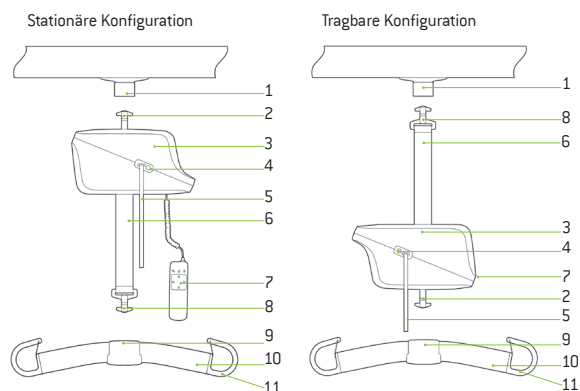

- Komponenten:
1. Cosmos Schienenlaufrollen/Adapter
 2. Ankerschlüssel
 3. Lifter
 4. Notstopp-Knopf
 5. Band für die Notabsenkung
 6. Lifterband
 7. Handsteuerung
 8. Ankerschlüssel
 9. Verriegelungsmechanismus
 10. Hebebügel
 11. Haken

Vor der Verwendung des Lifters


Inspektion vor der Verwendung

- Überprüfen Sie die Schnellverbindungen, bevor Sie den Lifter benutzen: Die grüne Markierung auf dem Ankerschlüssel muss sowohl am Hebebügel als auch am Lifter sichtbar sein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Tägliche Inspektion – Überprüfen Sie den Lifter vor der Benutzung stets auf sichtbare Anzeichen von Schäden. Vergewissern Sie sich, dass der Lifter korrekt auf dem Distanzband oder der Schienenlaufrolle sowie auf dem Hebebügel montiert ist. Überprüfen Sie Hebegurte und Bänder vor dem Gebrauch immer auf Anzeichen von Verschleiß. Nicht verwenden, wenn Verschleiß erkennbar ist.

Monatliche Inspektion - Prüfen Sie das komplette Hebeband auf Schäden oder Verschleiß. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, führen Sie dazu die Prüfung über die gesamte Länge des Hebebands durch.

Jährliche Inspektion - Der Lifter muss mindestens einmal jährlich von einer für Human Care-Produkte qualifizierten Person und in Übereinstimmung mit der Human Care-Richtlinie überprüft werden.

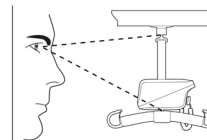

Anheben

Senken Sie das Hebeband auf eine bequeme Arbeitshöhe ab. Verbinden Sie einen geeigneten Hebebügel mit dem Lifter (lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Hebebügel verbinden).

Verwenden Sie die Handsteuerung, um den Hebebügel direkt über der pflegebedürftigen Person zu positionieren.

Befestigen Sie den Hebegurt zuerst mit den Hebegurtschlaufen am Hebebügel, dann mit den Beinschlaufen.

Heben Sie die pflegebedürftige Person mit dem Lifter leicht an und führen Sie einen Sicherheitscheck durch, dann fahren Sie mit dem transfer fort.

Halten Sie die Haken nicht fest, während Sie einen Hebevorgang durchführen.

Benutzen Sie den Hebebügel nicht, um die pflegebedürftige Person und den Lifter zu bewegen.

Allgemeine Pflege

	Reinigen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
	Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel am Deckenlifter.
	Aktivieren Sie den Notstopp, wenn der Lifter nicht benutzt wird.
	Laden Sie den Lifter jede Nacht auf.
	Desinfizieren.
	Nicht in Wasser eintauchen.



Wichtig! Benutzen Sie den Griff, wenn Sie den Lifter transportieren. Benutzen Sie nicht das Hebeband oder das Kabel der Handsteuerung!

Fehlersuche

Wenn Sie Probleme mit dem Lifter haben, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch nach.

Wenn nichts passiert, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Die Batterien sind vollständig entladen. Laden Sie den Lifter umgehend. 2) Der Not-Stopp ist herausgezogen. Deaktivieren Sie die Funktion, indem Sie den Knopf wieder hineindrücken.

Wenn nichts passiert, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird und die Serviceanzeige aufleuchtet.

1) Prüfen Sie die Handsteuerung. Wenn die Handsteuerung defekt ist, muss sie ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen Kundendienstmonteur.

Wenn nichts passiert, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Der Liftermotor ist überhitzt. Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut. 2) Der Lifter ist überlastet. Senken Sie den Lifter mittels des Notabsenknopfes ab.

Wenn nichts passiert, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Ladevorgang läuft. Ladevorgang unterbrechen.

Wenn nichts passiert, wenn die „nach oben“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Der Akku ist fast leer. Laden Sie den Lift auf. 2) Der Lift befindet sich in seiner obersten Position. Drücken Sie die Abwärtstaste an der Handsteuerung.

Wenn nichts passiert, wenn die „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Der Lifter befindet sich in seiner maximalen unteren Position. Drücken Sie die Taste „nach oben“ auf der Handsteuerung, um den Lifter anzuheben. 2) Der Lifter ist entladen. Ziehen Sie leicht am Band oder hängen Sie einen Hebebügel ein und drücken Sie die „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung nach unten, um ihn abzusenken.


Im Notfall

Notstopp - Im Notfall kann der Notstopp durch Ziehen der roten Schleife aktiviert werden. Diese Aktion bringt den Lifter sofort zum Stillstand und lässt den roten Knopf hervortreten. Um den Notstopp zurückzusetzen, drücken Sie den roten Knopf wieder hinein.


Sicherheitsabsenkung - Ziehen Sie zunächst am roten Band, um den Notstopp zu aktivieren. Ziehen Sie danach an dem roten Band und halten Sie es fest; dadurch wird die Sicherheitsabsenkung aktiviert. Die Sicherheitsabsenkung darf nur in Notsituationen verwendet werden, da man leicht die Kontrolle über den Lifter verlieren und sich dabei verletzen kann.

Notabsenkung - Sollte ein Stromausfall oder eine elektrische Störung (im produkt) auftreten, während sich die pflegebedürftige Person im Lifter befindet, wird die Notabsenkung aktiviert, und die Person fährt sicher und zuverlässig nach unten. Je nach Gewicht der pflegebedürftigen Person muss die Pflegekraft das Herunterziehen der Person unterstützen.

Notstopp und Absenken

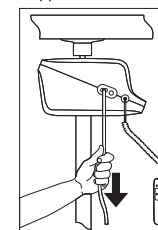

Notstopp zurücksetzen

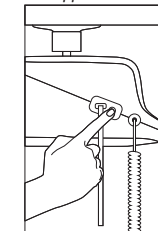

Pflegebedürftige Personen mit einem Herzschrittmacher sollten die Handsteuerung wegen des Magnetfeldes von ihrem Oberkörper fernhalten (Mindestabstand 153 mm).



Wichtig!
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch. Die neueste Version kann unter www.humancaregroup.com heruntergeladen werden.
Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen!